



Step-by-Step

Die Step-by-Step Tragehilfe funktioniert in Verbindung mit Germa-Umlagerungsmatratzen und eignet sich insbesondere für den Patienten- oder Verletztentransport durch sehr enge Treppenhäuser.

Das Set wird in einem kompakten Aufbewahrungsbeutel geliefert und nimmt nur wenig Platz ein.

Vorteile auf einen Blick:

- Platzsparend
- Geringes Gewicht
- Kann mit allen Germa-Matratzen verwendet werden
- Für Gewichte bis 250 kg
- Verstärkte Gurte mit anpassbaren Griffen für Kopf- und Fußende
- Zwei Patientenhaltergurte
- Angenähter Beutel verhindert das Herausrutschen der Patientenfüße

Modell-Nr. 1500000004



Einsatzbereites Step-by-Step Set
an der Umlagerungsmatratze G 030 befestigt

TREPPENTRANSPORT

Die an den Enden der Schultertragebegurtung (orange) angebrachten Karabinerhaken werden in die Griffaussparungen der Umlagerungsmatratze eingehängt.

Die blauen Gurte dienen der Patientensicherung. Ein Gurt wird im Oberkörperbereich des Patienten, der andere im Oberschenkelbereich an der Matratze wie abgebildet befestigt.

Der Schultertragegurt, an dem der Aufbewahrungsbeutel befestigt ist, wird am Fußende der Matratze angebracht. Die Füße des Patienten werden in diesen Beutel gesteckt. Somit ist der Patient dreifach gegen Verrutschen gesichert und der Transport kann beginnen.

Auf Treppenabsätzen kann die Matratze mit ihrer glatten Unterseite über den Boden gezogen werden.



TECHNISCHE DATEN

	Gewicht	Belastbarkeit max.	Farbe
STEP BY STEP	1,25 kg	250 kg	orange